

## *Gaspedalverlegung nach links - stehend*

- mechanische Gasumlegung inkl. Fußgassperre
- Montage auf dem Fahrzeugboden (schnell entfernbar)
- für alle Fahrzeugtypen geeignet

Stand: 02.2023 / Nr.: P1

Eine Gaspedalverlegung nach links ist für Personen geeignet, bei denen das rechte Bein in seiner Funktion eingeschränkt ist bzw. fehlt. Sie können mit Hilfe dieses Zusatzgerätes mit dem linken Fuß das Gaspedal betätigen. Bei der Gaspedalverlegung nach links - stehende Anordnung - ist zu beachten, dass vor das Originalgaspedal eine Fußgassperre angebracht wird und dadurch Platz für das rechte Bein verloren geht (ca. 4-5 cm weniger). Dieses kann für Prothesenträger oder Personen mit versteifter Hüfte problematisch sein.

Die Pedalverlegung wird mittels Bodenplatte, welche durch den Fahrzeugboden verschraubt ist, gehalten. Mit dem linken Fuß wird das Zusatzpedal (links neben dem Bremspedal) betätigt und über ein Gestänge synchron auf das original Gaspedal eingewirkt. Das original Gaspedal ist durch die vorgebaute Fußgassperre gegen unbeabsichtigtes Gas geben geschützt.

Ein Entfernen der Gaspedalumlegung kann in wenigen Augenblicken erfolgen, so dass auch Fahrer ohne Behinderung das original Gaspedal wieder benutzen können. Die Abnahme des Gerätes von der Bodenplatte ist durch Lösen einer Rändelschraube werkzeuglos möglich. Fahrzeuge mit Automatikgetriebe sind für eine Gaspedalverlegung nach links Voraussetzung.

**Bitte beachten Sie, dass ein Fahren mit einem Gaspedal links gewöhnungsbedürftig ist! Um mit einer Gaspedalverlegung fahren zu können bzw. zu dürfen, muss der Kunde Fahrstunden absolvieren und eine entsprechende Auflage in der Fahrerlaubnis besitzen!**



mit Abrutschkante

