

Rollstuhlverladesystem Typ „Ladeboy S / S2“

- automatische Verladung des Rollstuhles für Selbstfahrer
- universelle Lösung für fast alle Fahrzeugtypen
- Verladung auf die Rücksitzbank

Stand: 03.2023 / Nr.: R2S

Mit dem "Ladeboy S / S2" der Firma Rausch können Rollstuhlfahrer ohne fremde Hilfe Ihren Rollstuhl vom Fahrersitz aus ins Fahrzeug verladen. Die Verladehilfe bietet in Verbindung mit einer nachgerüsteten Schwenktür hinten links bzw. einer originalen Schiebetür den kompletten Bedienungskomfort. Die Verladung des Rollstuhles erfolgt nahezu vollautomatisch. Nach dem Umsetzen auf den Fahrersitz genügt ein Knopfdruck und schon öffnet sich die hintere Autotür und das Verladesystem fährt raus. Der gefaltete Rollstuhl wird nun an den Rollstuhllift geschoben und mittels eines Haltebügels verriegelt.



Per Knopfdruck fährt das System hoch und zieht den Rollstuhl rein. Der Verladevorgang kann jederzeit durch Loslassen des Bedienschalters unterbrochen werden. Bei diesem System wird der Rollstuhl auf die Rücksitzbank verstaut. Je nach Größe des Rollstuhles (Höhe der Schiebegriffe) und Fahrzeugbreite kann u. U. ein Sitzplatz erhalten bleiben. Ansonsten entfällt die gesamte Rücksitzbank. Der Kofferraum wird nicht beeinträchtigt. Alternativ gibt es für einige Fahrzeugtypen auch ein Drehmodul, so dass ein weiterer Sitzplatz erhalten bleibt, jedoch geht dabei ein Teil des Kofferraumes verloren.



Das Rollstuhlverladesystem Typ "Ladeboy S / S2" eignet sich für faltbare Rollstühle und faltbare Elektro-Rollstühle bis zu einem Gewicht von 38 kg (z.B. e-motion). Es sind aber auch Sonderlösungen bei Fahrzeugen mit originaler Schiebetür möglich, wo der Rollstuhl auch ungefalteter verladen werden kann. Grundsätzlich lässt sich das System in alle 4-türigen Fahrzeuge montieren. Bitte klären Sie vor Fahrzeugkauf unbedingt die Machbarkeit in Zusammenhang mit Ihrem Rollstuhl! Bei einem Fahrzeug- oder Rollstuhlwechsel ist der "Ladeboy S / S2" oftmals wieder verwendbar.

