

### Schwenksitzvorrichtung Beifahrerseite

- Drehvorrichtung für den Autositz auf der Beifahrerseite zum leichteren Ein- und Ausstieg
- Unter Umständen Spezialsitz erforderlich

Stand: 04.08.2020/ Nr.: S3 - B

Die mechanische Schwenksitzvorrichtung dient als Ein- bzw. Ausstiegshilfe für mobilitätseingeschränkte Personen. Nach Betätigung des Entriegelungshebels lässt sich der Sitz per Hand leicht über den Türholm um 90° hinaus drehen (auf Wunsch auch elektr. per Knopfdruck). Nach dem Schwenken bleibt der Sitz solange in seiner Position eingerastet, bis der Hebel erneut betätigt wird. Zusätzlich kann der Sitz per Laufschienen nach erfolgter Drehung (oder im Fahrzeug) um ca. 20 cm rein oder raus geschoben werden.



Konstruktions- aber auch platzbedingt kann nur in Ausnahmefällen der Originalsitz verwendet werden. Die Schwenksitzvorrichtung wird dann wahlweise mit einem orthopädischen Sitz bestückt, z.B. von Recaro, König, Schellmann o.ä.. Der Sitzseitenairbag im gedrehten Sitz entfällt dann. Die robuste Konstruktion garantiert Langlebigkeit auch bei der ständigen Verwendung durch gewichtige Benutzer. Zweitürige Fahrzeuge sind aufgrund ihrer größeren Türen den viertürigen vorzuziehen. Durch ein zusätzliches Anbausystem (Tilda), kann jedoch der Sitz nach hinten gekippt werden, wodurch beim Drehen mehr Platz für die Knie entsteht. Bitte kontaktieren Sie uns vor Autokauf bzw. Auftragserteilung, da nicht jede Person in jedes Fahrzeug verladen werden kann.

