


Schwenksitzvorrichtung Typ „Turny Low Vehicle“

- Drehen des Autositzes um bis zu 113°
- Sitz fährt komplett aus dem Fahrzeug heraus
- Einsteigen ins Auto erheblich erleichtert

Stand: 07.05.2021 / Nr.: S4

Das Einsteigen in einen PKW ist für Senioren oder Personen mit Handicap oft ein großes Problem und es fällt ihnen schwer, auf den Fahrer- oder Beifahrersitz zu gelangen. Erleichterung kann bei dieser Problematik der Schwenksitz Typ „Turny Low Vehicle“ bieten. Die Handhabung ist denkbar einfach: Der Sitz wird elektrisch mittels Kabelfernbedienung um bis zu 113° aus dem Fahrzeug gedreht und fährt 30 cm hinaus, so dass er sich komplett außerhalb des Fahrzeuges befindet. Ein bequemes Hinsetzen ist nun möglich. Wiederum per Knopfdruck wird der Sitz sanft zurück in den Fahrgastraum geschwenkt. Innerhalb des Fahrzeuges kann der Sitz elektrisch vor und zurück verstellt werden.

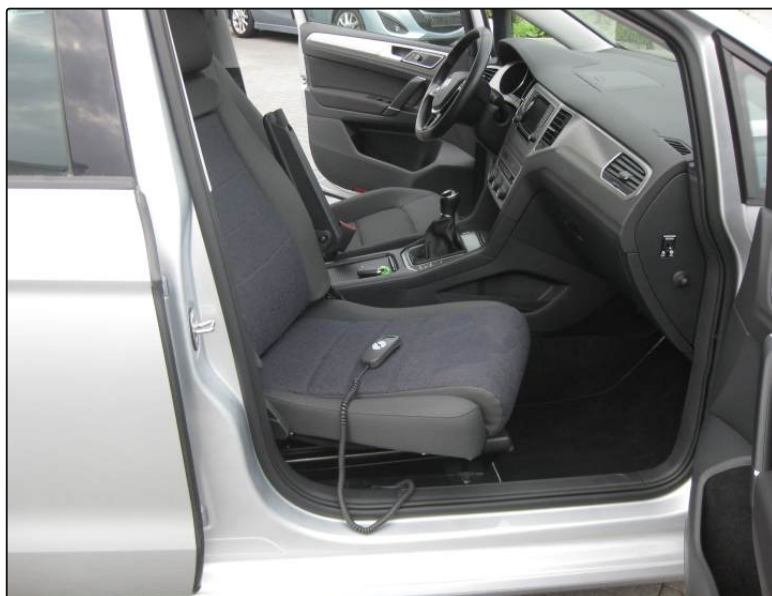

Durch die individuelle Programmierung ist es möglich, den Sitz ganz dicht an der B-Säule vorbei zu drehen. Dadurch kann möglichst viel Kopf- und Beinfreiheit erhalten werden. Ein manueller Notbetrieb ist möglich.

Standardmäßig wird der Turny Low Vehicle auf der Beifahrersitzposition montiert. Bei einigen Fahrzeugtypen ist auch eine Montage auf der Fahrersitzposition denkbar. Dies ist jedoch abhängig vom Fahrzeugtyp, der Türbreite, der Türhöhe, des Armaturenbrettes und natürlich von der zu verladenden Person. Der Originalsitz ist nicht verwendbar.

