

Rollstuhlschwenksitz Typ „Carony“

- Kein Umsetzen des Rollstuhlfahrers notwendig
- Rollstuhlfahrer verbleibt im Autositz
- Für viele Fahrzeugtypen geeignet

Stand: 09.02.2016 / Nr.: S6

Das Umsetzen von Rollstuhlfahrern in PKW's ist oft ein umständliches und kräftezehrendes Unterfangen. Eine Möglichkeit Rollstuhlfahrer ohne Umsetzen in das Fahrzeug zu bekommen, bietet der Rollstuhlschwenksitz Typ "Carony". Es ist ein Sitz-Wechsel-System, bei dem das Umsetzen entfällt, da der Rollstuhlfahrer im Autositz sitzen bleibt. Es besteht aus drei Teilen:

- einem Spezial-Autositz
- einer Schwenksitzvorrichtung und
- einem leichten, stabilen Rollstuhlunterteil



Die Handhabung ist denkbar einfach: Der Rollstuhlfahrer wird im „neuen Rollstuhl“ mit dem Spezialsitz rückwärts an die geöffnete Fahrertür gefahren. Der leere Drehteller wird herausgedreht und der Rollstuhl an die Schienen „angedockt“. Über einen Hebel wird nun die Verbindung von Sitz und Rollstuhlunterteil gelöst. Der Rollstuhlfahrer wird anschließend mit dem Sitz von der Begleitperson ins Fahrzeug geschoben und auf der Schwenksitzvorrichtung verankert. Die Schwenksitzvorrichtung wird anschließend ins Fahrzeug gedreht. Der Rollstuhlfahrer sitzt nun bequem und sicher im Fahrzeug und die Begleitperson kann abschließend das Rollstuhlunterteil im Kofferraum verstauen.

Die Auswahl des für Sie am besten geeigneten Spezialsitzes, Rollstuhlunterteiles, sowie der Schwenksitzvorrichtung ist abhängig von Ihrer Behinderungsart, Sitzhöhe und dem Fahrzeugtyp. Vor Kauf eines Fahrzeuges sollte deshalb unbedingt eine Beratung bei uns im Hause stattfinden. Aufgrund der größeren Türbreite sind 2-türige PKW's zu bevorzugen. Der Rollstuhlschwenksitz Typ "Carony" ist in Kombination mit dem Hebesitz Typ "Turny" auch für Fahrzeuge mit hohem Einstieg geeignet.

